



Avant d'installer

Pour assurer la bonne installation et le bon fonctionnement du logiciel Inspire[®], veuillez vérifier que vous disposez de la configuration minimale :

- **Processeur** : Core 2 duo ou supérieur
- **Mémoire vive (RAM)** : 4 GB minimum ou supérieur
- **Système d'exploitation** : Windows[®] 7, Windows 8 ou 8.1, Windows 10
- **Navigateurs internet (pour commander en ligne)** :
 - Internet Explorer[®] - dernière version
 - Chrome[™] - dernière version
 - Firefox[®] - dernière version
 - Microsoft Edge[®] - dernière version
- **Interface de programmation** :
 - Port serial COM (ou un convertisseur certifié USB - Sérial) est nécessaire pour HiPro et HiPro 2
 - USB port pour SpeedPort[™], SpeedPort 2, NOAHlink, HiPRO USB, Programmateur SurfLink[®] sans-fil ou Programmateur TruLink[®] sans-fil et programmeur NOAHlink sans-fil
- **Audio** : carte son et haut-parleurs externes sont recommandés pour profiter pleinement des sons de médias
- **Base de données clients** : Système NOAH 3.7, ProHear, PatientBase

Instructions d'installation

Inspire ne nécessite pas l'installation d'une base de données spécifique. Inspire s'installe à partir d'une clé USB, d'un CD-Rom, suite au téléchargement du logiciel ou une mise à jour via Inspire Updater.

Si pendant le processus, vous êtes invité à redémarrer votre ordinateur, veuillez suivre les instructions après le redémarrage jusqu'à l'apparition du message "Terminer". Insérer la clé USB ou le CD Inspire pour commencer l'installation. Si l'installation ne se lance pas automatiquement, veuillez consulter les dossiers et cliquez sur "Setup.exe".

