




MODELES	RIC MOLD ZON	3D ZON AVEC TUBE SOUPLE	3D MINI * ZON AVEC TUBE SOUPLE (pour les petits conduits)	3D OPEN ZON VARIOFIT OU CUSTOMFIT
LARGEUR DU CONDUIT	plus de 7 mm	<ul style="list-style-type: none"> moins de 7 mm non coudé 	<ul style="list-style-type: none"> moins de 7 mm non coudé 	moins de 7 mm
EMPREINTE	2 ^{ème} coude	1 ^{er} coude	1 ^{er} coude	1 ^{er} coude
MATIERE	Silicone hypoallergénique	UV hypoallergénique	UV hypoallergénique	UV hypoallergénique
EVENT (taille d'évent conseillée en fonction de la taille du conduit)	NV = sans évent 1V = 1 mm 2V = 1,5 mm 3V = 2 mm Aération supérieure possible en fonction de la taille du conduit	NV = sans évent 1V = 1 mm 2V = 1,5 mm 3V = 2 mm VARIO = si place disponible OPEN = le plus large possible	NV = sans évent 1V = 1 mm 2V = 1,5 mm 3V = 2 mm OPEN = le plus large possible	VARIO = si place disponible OPEN = le plus large possible
RECOMMANDATIONS D'UTILISATION	<ul style="list-style-type: none"> Couper l'épaulement de l'écouteur Utiliser le fil d'extraction de l'embout pour enlever l'écouteur 	<ul style="list-style-type: none"> Respecter le mode d'emploi Bien faire ressortir l'écouteur pour : <ul style="list-style-type: none"> - favoriser l'accès patient à la protection cérumen HearClear - obtenir la meilleure esthétique 	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas hésiter à laisser dépasser l'écouteur de l'embout dans le cas de conduit plus court Utiliser le fil d'extraction de l'embout pour enlever l'écouteur 	Embout fragile <ul style="list-style-type: none"> Bien respecter le mode d'emploi
PHOTO			MODELE DISPONIBLE LE 31 OCTOBRE 2008	

* sur l'embout 3D MINI ZON AVEC TUBE SOUPLE la sortie écouteur est au centre de l'embout