


# Notice d'utilisation de la fonction T<sup>2</sup>

Le téléphone émettra un signal sonore (ou bip) quand les touches seront pressées pour activer la commande souhaitée : augmenter le volume ou changer le programme de votre aide auditive.

- Maintenir le téléphone entre 5 à 10 cm de l'oreille.
- Presser la touche \* 2 fois (\*\*) pour activer la fonction T<sup>2</sup> (une série de "bip" indiquera que l'aide auditive est prête à être télécommandée).
- Presser la touche du téléphone correspondant à la commande souhaitée.
- La fonction T<sup>2</sup> se mettra en mode "veille" au bout de 20 secondes.

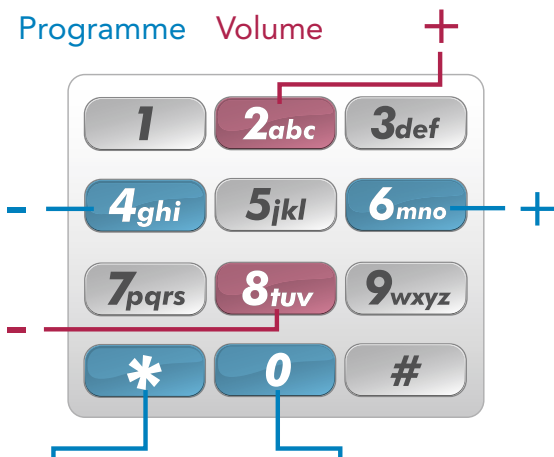

Pressez 2 fois la  
touche \* pour activer/  
désactiver "veille"

Muet



# Notice d'utilisation de la fonction T<sup>2</sup>

## Problèmes et solutions

SYMPTOMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'aide auditive ne répond pas aux commandes du téléphone	Les touches du téléphone n'émettent pas de "bips" sonores	Consultez le guide d'utilisation du téléphone concernant les "bips" sonores
	La fonction T <sup>2</sup> n'a pas été déverrouillée avant de télécommander	Pressez ** et écoutez uniquement les indicateurs sonores de la fonction T <sup>2</sup>
	Le téléphone est trop loin de l'aide auditive	Rapprochez le téléphone près du microphone de l'aide auditive
	Touche de télécommande incorrecte	Pressez ** pour activer la fonction puis pressez les touches 2 ou 8 pour augmenter/ diminuer le volume. Pressez les touches 4 ou 6 pour changer de programme si l'aide auditive est équipée de la fonction Multiprogramme
L'aide auditive fonctionne mais ne veut pas être télécommandée	La fonction T <sup>2</sup> s'est mise en mode "veille"	Pressez ** pour activer puis pressez la touche correspondant à la commande souhaitée